

F.T.C Reuse™ 旅行用防疫包使用 SOP

旅行前：

1. 上計程車或自行開車或搭公共交通工具前，請將防疫包取出先檢視內部附有可重覆水洗**防護風衣**一件、可重覆用**口罩**一個、**護目鏡**一個、**拋棄式手套**一副、**空噴霧瓶**一罐、**防火收納袋**一個共計六項產品。
2. 出發前請自行將 75%酒精灌入**噴霧瓶**內。



3. 雙手先用酒精消毒，打開**防火收納袋**，取出**防護風衣**，打開領子拉鏈取出帽子，再將胸前拉鏈打開穿上。
4. 打開**重覆用口罩**包裝，調整**口罩**耳掛長短，先行掛上並注意其必須密合臉部。



5. 打開**護目鏡**包裝，有戴眼鏡者亦可直接戴上，請注意下緣需壓住**口罩**上層以增加密合安全性。
6. 拉上**帽子**、拉緊**束帶**，使整個密合即可安全防護整個臉部，若要坐下，此風衣設計為**雙向拉鏈**，另後面有開叉，可將下部拉鏈打開再行坐下較舒服，腰部亦有**鬆緊帶**，可依體型調整舒適度，胸前**口袋**可放置護照，兩側有**隱藏式口袋**亦可放置行動電話，讓你在長期飛行中無後顧之憂。



7. 最後取出拋棄式手套一雙，撕開後戴上，拉長至風衣袖口處保持密合，外包裝保留可以於使用後置入以免污染，如此就大功告成，可立即出發，展開一場安全防護的旅行。



旅行後：

1. 請先將手套脫下置入外包裝丟棄，脫下護目鏡後使用酒精消毒；再取下口罩—此口罩外布使用 SUN-ECO 光觸媒加工，內布使用銅纖維材質，可殺菌除臭，中間有 PTFE 可阻隔飛沫，使用後可手洗或洗機清洗。
2. 再脫下風衣，此風衣布料外面有 SUN-ECO 光觸媒加工，並使用 NEGA-STAT® 抗靜電碳纖維，不易沾染病菌，再加上高密度組織防水及壓光超潑水等，耐水壓達 500m/mHg 之高科技技術加工，通過 CNS 14798 P2 等級測試，可用酒精全面噴至衣服表面靜置 30 分鐘或浸泡於次氯酸水 500PPM(市售漂白水 5-6%+冷水稀釋 100 倍)30 分鐘後再置入洗衣機進行一般洗程進行清洗即可。
3. 所有配件消毒完成可置入防火防疫包內，待下次使用，此風衣及口罩可重覆使用 30 次上，可以減少棄式垃圾及環保愛地球。
4. NOMEX 防火防疫包在緊急時可反戴，可當逃生頭套使用



福懋興業股份有限公司
FORMOSA TAFFETA CO., LTD.
TEL: +886-2-87701716
<http://www.ftc.com.tw>